



NOTA BENE:

Per una corretta misurazione, il chart deve essere stampato in scala 1:1. Assicurati che le impostazioni di stampa siano corrette. **Non selezionare** l'opzione "Adatta alla pagina".



COME MISURARE L'ANGOLO DI AVVOLGIMENTO / ZTILT

Capovolgi la montura (up side down) e posizionala sull'immagine di colore grigio. La lente destra dev'essere allineata, nella zona temporale e nasale, alla linea blu. L'angolo di avvolgimento verrà misurato nella scala di destra, sulla linea che coincide con il **bordo temporale** della lente sinistra (non con il bordo della montatura).

